

KLINISK KEMIHandläggare
MS/ya

Direkttelefon

Datum
2020-11-26
Ert datumVår beteckning
21 - 2020
Er beteckning

Till våra beställare

Ny gemensam lot på internkontroll till HemoCue Hb

Senast den 4 december 2020 behöver ni byta till en ny lot av HemoTrol Normal (Level 2) eftersom den gamla är slut i laboratoriets lager.

- Hämta den nya internkontrollen på närmaste laboratorium (beställ inte från Mediq, laboratoriet har ett lager till hela Region Värmland).
- Tänk på att börja på ett nytt kontrollprotokoll i samband med bytet och fyll i nytt riktvärde och gränser.
- Kassera det gamla kontrollmaterialet.


Internkontrollen ska analyseras varje dag ni har ett patientprov, se vidare <http://livlinan.liv.se/Vardanvisningar/Laboratoriemedicin/Laboratoriemedicin/Patientnara-analys-PNA/Hemoglobin/>

Kontaktperson är din lokala PNA-samordnare: <http://livlinan.liv.se/Vardanvisningar/Laboratoriemedicin/Laboratoriemedicin/kontakt/pna-samordnare-laboratoriemedicin/>


Forts nästa sida

För kännedom gällande enstycksförpackade kuvetter till HemoCue Glukos 201 RT:

Under en tidsperiod kan folieförpackningen sakna beteckningen RT:

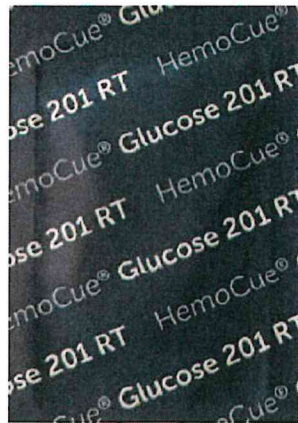

Nuvarande individuell
förpackning (folie)

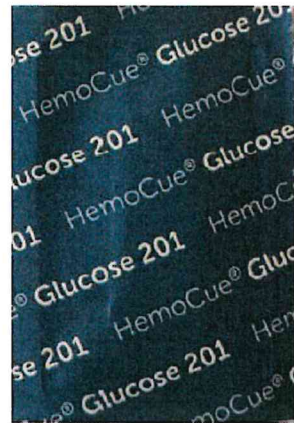

Tillfällig individuell
förpackning (folie)

Den tillfälliga förändringen av folieförpackningen påverkar inte innehållet. **Ni kan fortsätta att analysera glukos som vanligt.** På den yttre kartongförpackningen kommer det fortfarande att stå att det är HemoCue Glucose 201 RT Microcuvettes.

Kontaktperson:
Mirjam Sköld, PNA-samordnare
telefon 010-83(9 15 32)
mirjam.skold@regionvarmland.se

Clas-Göran Eriksson

Clas-Göran Eriksson
Överläkare

*Mirjam
Tijunio
Berglund*